


Phonak Roger Select™ iN Installationsanleitung

Benötigtes Material:

- Marvel Hörgeräte (aktuelle Firmware)
- Roger Select iN
- Pin-Tool (= Aus- und Einbauwerkzeug für Sicherungsstift, wenn nicht vorhanden, bitte separat bestellen)

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Roger Select iN einschalten
2. Installations-Taste zwei Sekunden lang mit dem Pin-Tool drücken bis die LED blinkt
3. Roger Select iN auf den Tisch legen
4. Eines der beiden Hörgeräte einschalten (das andere Hörgerät ausgeschaltet lassen)
5. Das Hörgerät nah an das Roger Select iN heranführen (max. 10 cm Abstand)
6. Ungefähr 5 Sekunden warten bis die LED auf dem Roger Select iN durchgehend leuchtet
7. Die Schritte 2 bis 6 mit dem zweiten Hörgerät wiederholen

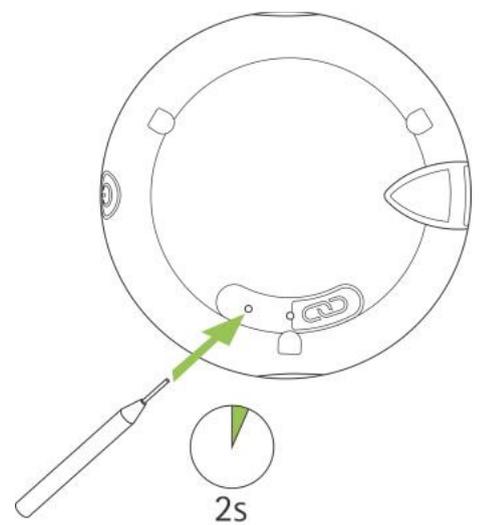

Führen Sie zur Deinstallation die gleichen Schritte durch.

Tipp:

Wenn Sie die Anzahl der installierten Empfänger prüfen möchten, drücken Sie kurz die Installationstaste. Die Statusanzeige gibt die Anzahl der installierten Roger-Empfänger an:

- ● Zwei Roger-Empfänger installiert
- ● Ein Roger-Empfänger installiert
- ● Kein Roger-Empfänger installiert