


# Visit Babyruf-Sender BE1491

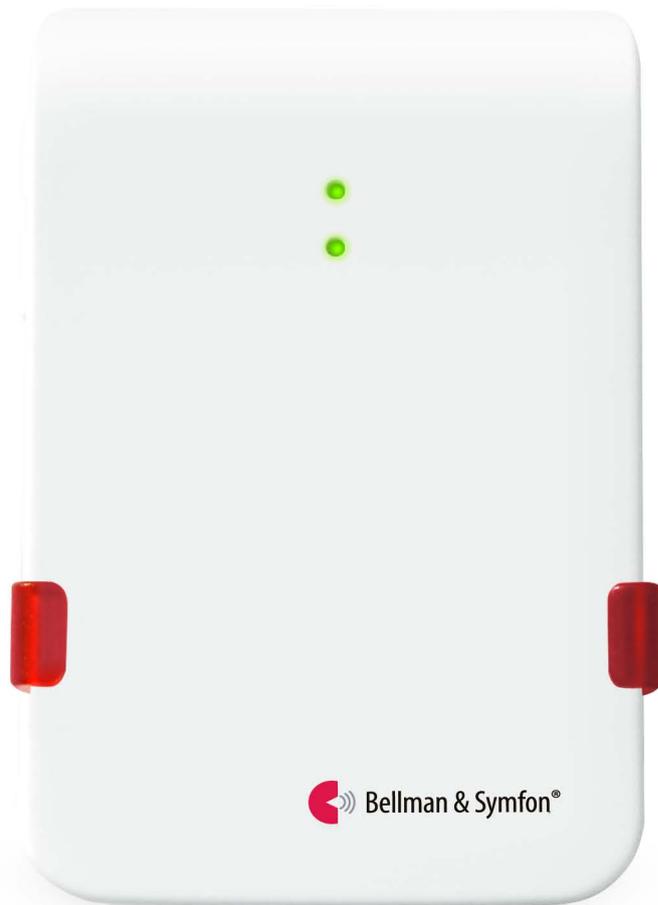

## Eigenschaften

**Zuverlässige Übertragung**  
Bis zu 200 m Reichweite

**Flexibel**  
Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung

**Anpassbare Benachrichtigung**  
Verwenden Sie ein eigenes Signal für jedes Kind

**Optionale Kontaktmatte**  
Wissen wenn Ihr Kind das Bett verlässt

**Einfach zu bedienen**  
Keine komplizierten Menüs

## Seien Sie für Ihr Baby da

Die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit Ihres Babys ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie als Eltern tragen. Bellman & Symfon bietet eine vollständig sichere Babyruf-Lösung für Eltern mit Hörverlust. Der Visit Babyruf-Sender informiert Sie sobald Ihr Baby Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind.

### Wie es funktioniert

Wenn der Visit Babyruf-Sender aktiviert wird, signalisiert er dies Ihren Visit Empfängern - diese benachrichtigen Sie mit Tönen, Lichtblitzen oder Vibrationen (je nach Empfänger).

### Sicher und zuverlässig

Visit nutzt eine sichere Funkverbindung die das gesamte Haus abdeckt, sodass Sie immer informiert sind.

### Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung

Sie können die Empfindlichkeit und Verzögerung des Babyruf-Senders stufenweise nach Ihren Anforderungen einstellen.

### Anpassbare Benachrichtigung

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie verschiedene Signale wählen, sodass Sie wissen welches Ihre Aufmerksamkeit braucht.



# Technische Daten




## Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **4.0", 100 mm**  
Breite: **2.6", 65 mm**  
Tiefe: **1.1", 27 mm**  
Gewicht: **4.2 Unzen, 120 g inkl. Batterien**



## Tasten und Anschlüsse

Test/Einstellungs-Tasten LED-Leuchten Ext. Trigger Eingang Mikrofone

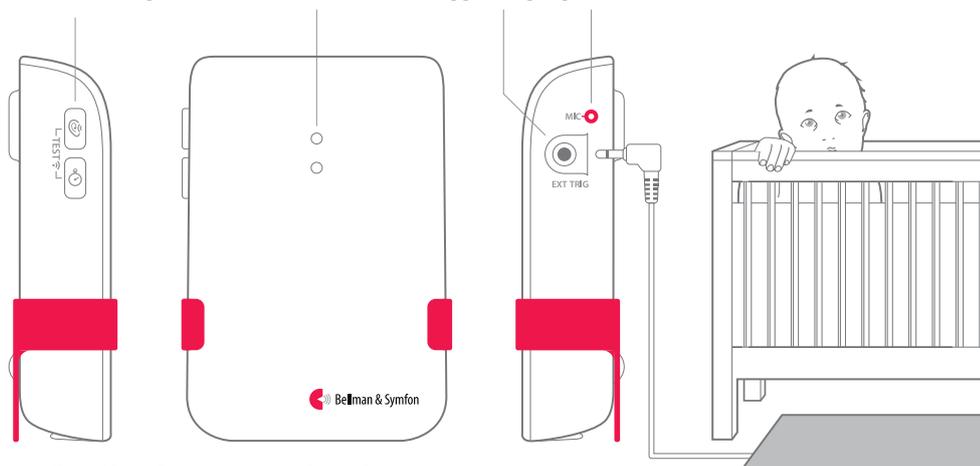

**!** Hinweis! Stellen Sie sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite des Kindes befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals in die Wiege oder den Kinderlaufstall des Kindes.

## Ein-/ Ausgänge

- 3.5 mm externer Trigger Eingang

## Aktivierung

- Die Test Tasten und die internen Mikrofone
- Die Kontaktmatte (Zubehör)

## Einstellungen

- Empfindlichkeit: Hoch, Mittel, Niedrig
- Verzögerung: 30 Sek, 10 Sek, 1 Sek

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 315 MHz, 433.92 MHz oder 868.3 MHz, je nach Region
- Reichweite: 50 - 200 m, je nach der Funkfrequenz und Gebäudemerkmalen

## Einsatzbereich

- Nur für den Innenbereich
- Temperatur: 59° bis 95° F (15° - 35° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (nicht kondensierend)

## Stromversorgung und Batterie

- Stromversorgung  
Batteriebetrieb 2 x 1.5 V AA Lithium oder Alkali
- Stromverbrauch  
Aktiv < 70 mA, Leerlauf < 400 µA
- Betriebszeit  
Alkali ~ 6 Monate, Lithium ~ 1 Jahr

## Anzahl der Funkschlüssel

- 64 als Standard. Bis zu 256 mit optionaler Software.

## Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Reinigen mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.
- Nicht für die Wiederverwendung durch andere Personen vorgesehen.

## Regulatorische Anforderungen

- Entspricht den folgenden Anforderungen: WEEE, Der Grüne Punkt, CE, RoHS, C-tick, A-Tick



## Lieferumfang

- BE1491 Babyruf-Sender
- Standfuß
- 2 x 1.5V AA Alkali-Batterien
- Reinigungstuch
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



## Zubehör

Folgendes Zubehör ist verfügbar:

- BE9024 Kontaktmatte

© und TM-2014 Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt-Designs sind patentiert. Diese Broschüre kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1431\_001DAS001\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)